

Gebruikershandleiding **CleanWND®** doek

CLEANWND® doek voor reiniging /debridement van complexe wonden.

Product Code 2015A: Per zakje: 1 doek, per box 10 zakjes.

Product Code 2015C: Per zakje: 1 doek, per box 20 zakjes.

Gebruik van de doek:

Open de verpakking zoals aangegeven en neem het doek uit de verpakking.
Gebruik het doek om de wond te reinigen en debridement uit te voeren.

De **CLEANWND®** doek heeft qua gebruik geen boven- of onderkant.

Gebruik één **CLEANWND®** doek per wond om te reinigen/debridement uit te voeren.

De **CLEANWND®** doek is al vochtig en er zijn dus geen andere vloeistoffen nodig om de wond te reinigen/debridement uit te voeren.

Gooi de doek na gebruik weg als klinisch afval.

Reiniging/debridement van:

Complexe Wonden zoals diabetische voet ulcera, veneuze been ulcera en decubituswonden. Het product is niet bedoeld voor gebruik bij grote wonden.

Actieve bestanddelen:

Sodium hyaluronate, Phospholipid, Aloe Vera

Waarschuwing:

Gebruik de doek niet als de verpakking al open is. Gebruik bij baby's van 0-6 maanden en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven alleen onder supervisie van een arts.

Patiënten die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van de **CLEANWND®** doek moeten het niet gebruiken. In het geval van een allergische reactie, stop onmiddellijk met het gebruik van het doek en consulteer uw arts.

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via mail of mobiel:

- Wilbert@protexhealthcare.com
- Marije@protexhealthcare.com
- **Marije Spaargaren; 06-20786296**
- **Wilbert van Kempen; 06-15124064**