

Multidex®

Manufactured by



Improving Care. Improving Business.

Distributed by



Multidex® gel/poeder:

Wondverband in gel of poedervorm op basis van Maltodextrine; voor de behandeling van al dan niet geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe, droge tot vocht afgevend wonden.

Het steriele Multidex® wondverband is opgebouwd uit **Maltodextrine** met **glycerine** en steriel water en bevat **1% ascorbinezuur**. Het wondverband in gel of poedervorm handhaaft een vochtig wondmilieu en voorkomt uitdroging van de wond. Dit heeft een gunstig effect op de groei van nieuw granulatieweefsel en de epitheliale proliferatie. De gel of poedervorm verzacht necrotisch weefsel, waardoor debridement wordt vergemakkelijkt. Verder wordt onaangename geur binnen 24 tot 72 uur verwijderd. De gel of poedervorm heeft een reinigende werking.

Specificaties:

- Wondverband in gel en/of poeder vorm
- Op basis van Maltodextrine
- Bevat 1% ascorbinezuur
- Steriel

Toepassen voor:

- huidzweren (waaronder beenzweren, zweren tgv druk en andere laesies met afscheiding)
- diabetische ulcera (zweren)
- abdominale wonden
- geïnfecteerde wonden
- oppervlakkige wonden
- decubitus
- snijwonden
- abrasies

Vorbereiding:

- Maak de wond schoon volgens protocol
- Verwijder overtollig necrotisch weefsel
- Spoel de wond overvloedig met een steriele fysiologische NaCl-oplossing

Aanbrengen:

- Gebruik bij licht tot matig exsuderende wonden de Multidex® Gel. Bij sterk exsuderende wonden gebruikt u de Multidex® Poeder
- Bij een ondiepe wond: breng de gel/poeder aan met een 6mm dik laagje over de gehele wond
- Bij een diepe wond: vul de wond op tot aan het oppervlak en zorg ervoor dat alle zones gevuld zijn
- Dek de wond af met een secundair wondverband
- Multidex®, 3 x per week aanbrengen
- Bij minimale hoeveelheid wond exsudaat en granulerende wonden; verband eenmaal per dag vervangen
- Bij sterk exsuderende wonden; tweemaal per dag het verband vervangen

Verwijderen:

- Verwijder voorzichtig het secundair wondverband. Zo nodig het verband enkele minuten doordrenken met een zoutoplossing
- Spoel de wond overvloedig met een steriele fysiologische irrigatieoplossing om Debris te verwijderen

Houdbaarheid:

- Zie verpakking
- Mag worden gebruikt tot 30 dagen nadat de verpakking is geopend