

MULTIDEX[®]

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!



MULTIDEX[®]

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!

WAT IS MULTIDEX[®] WONDVERBAND?

Multidex[®] is een wondverband in gel- of poedervorm op basis van Maltodextrine en Vitamine C voor de behandeling van complexe wonden.

GEL



licht tot matig
exsuderende wonden

POEDER



matig tot sterk
exsuderende wonden

WERKING

Multidex[®] creëert een vochtig wondmilieu, wat uitdroging van de wond voorkomt en gunstig is voor de groei van nieuw granulatieweefsel en epitheliale proliferatie.

Maltodextrine stimuleert autolytisch debridement in de wond door het aantrekken van witte bloedcellen die debris en bacteriën verteren door phagocytose en van fibroblasten die collageen vormen en de groei van granulatieweefsel bevorderen.

De **Vitamine C** in Multidex[®] creëert een pH van 4.2 in de wond. Dit ondersteunt het bacteriedodend en bacteriostatisch mechanisme voor sommige aërobe/anaërobe, gram negatieve/gram positieve bacteriën. Vitamine C is tevens noodzakelijk voor collageensynthese.

SAMENSTELLING

Multidex[®] bevat:

Maltodextrine NF (D – Glucose Polysaccharide)

1% ascorbine zuur / Vitamine C

De gel bevat tevens water en glycerine.

KENMERKEN / VOORDELEN

Voor gebruik bij al dan niet geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe, droge tot vocht afgevende complexe wonden.

Levert een significante bijdrage aan het autolytisch debridement.

Ondersteunt sterke afname en beheersing van (intens) geurende wonden < 24 - 72 uur.

Mengt snel en vult alle wondoneffenheden op, waaronder o.a. ondermijningen.

Creëert en ondersteunt een optimaal vochtig wondmilieu.

Geen systemische opname, dus ook geschikt voor diabetische patiënten.

Niet toxisch, natuurlijke ingrediënten.

Betaalbaar & gebruiksvriendelijk.

TOEPASSINGEN

Veneuze beenulcera

Diabetische voet ulcera

Geïnfecteerde wonden

Oppervlakkige / diepe wonden

Decubitus wonden

Tweedegraads brandwonden

VERBANDWISSEL FREQUENTIE

3x per week

MULTIDEX®

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!



VERPAKKINGSEENHEID

Multidex® is beschikbaar als gel (voor licht tot matig exsuderende wonden) en als poeder (voor matig tot sterk exsuderende wonden).

Z-INDEX	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	EENHEID
16199804	46-701NL	Multidex® Powder Wound Filler	45 gram	1 Tube
16673786	46-703NL	Multidex® Powder Wound Filler	12 gram	5 Tubes
16199693	46-712NL	Multidex® Gel Wound Filler	85 gram	1 Tube
16315340	46-710NL	Multidex® Gel Wound Filler	14 gram / 15 ml	1 Doos / 10 stuks

PROTEX HEALTHCARE,
Duwijkstraat 17, 2500 Lier, Belgium
info@protexhealthcare.com, www.protexhealthcare.com

Multidex® is een product van de firma DeRoyal®



Improving Care. Improving Business®



Multidex are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc. Multidex® is a registered trademark of DeRoyal Industries, Inc. Copyright© 2019, DeRoyal. All rights reserved. All products shown are legally marketed in accordance with United States laws and regulations but may not be available for sale in all countries.